



# Carriere InfiNiTi Loops


## Die effiziente Lösung für den Lückenschluss im oberen Frontzahnsegment

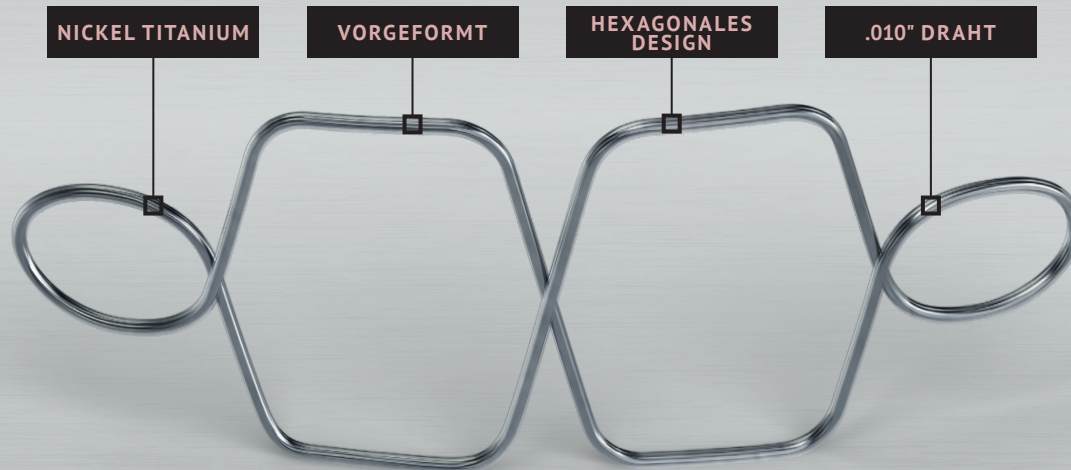

## BEI PLATZIERUNG

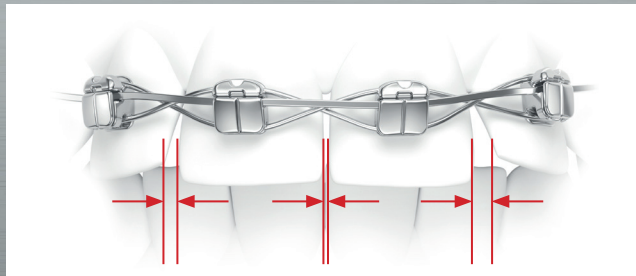

## NACH LÜCKENSCHLUSS

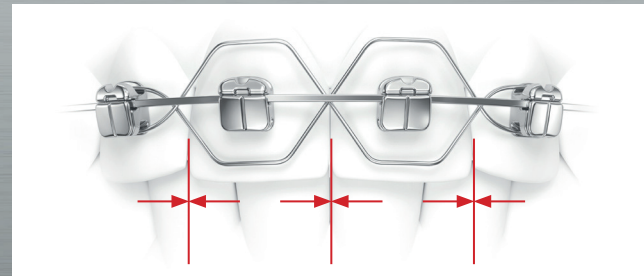

Nach erfolgreichem Lückenschluss  
der oberen Frontzähne.

Der Power Closer hat wieder seine  
ursprüngliche Form angenommen.

## InfNiTi Loops Power Closer

Für den Lückenschluss werden oft elastische Gummiketten oder Gummizüge eingesetzt, welche problemlos mit festsitzenden Apparaturen kombinierbar sind. Großer Nachteil dieser kleinen Hilfsmittel ist deren materialbedingter Kraftverlust, der ein regelmäßiges Wechseln und somit zusätzliche Praxistermine erforderlich macht, bis letztlich der angestrebte Lückenschluss und die gewünschte Retraktion erreicht sind.

Mit den **InfNiTi Loops** steht Behandlern nun eine innovative Lösung zur Verfügung, die durch ein von Anfang bis Ende nahezu unverändertes Kraftniveau überzeugt. Während bei herkömmlichen Lösungen aus elastischem Gummi nach sieben Tagen weit weniger als die Hälfte des ursprünglichen Kraftniveaus verblieben sind, behalten die von Dr. Luis Carrière entwickelten **InfNiTi Loops** mehr als 90% ihrer anfänglichen Kraft. Zudem werden aufgrund des superelastischen NiTi-Materials jederzeit sanfte, gleichmäßige Kräfte appliziert.

Darüber hinaus punktet die aus vier vorgeformten Schlaufen bestehende Neuheit durch eine Effizienz, die am Markt ihresgleichen sucht. Lediglich ein **InfNiTi Loops Power Closer** ist erforderlich, um im oberen Frontzahnbereich Lücken bis zu 6 mm zu schließen. Ein Austauschen der in vier verschiedenen Größen (21, 24, 27 und 30 mm) erhältlichen Loops ist nicht erforderlich.


**Hergestellt aus .010" superelastischem NiTi, unauffällig und kaum spürbar im Mund. Und ein weiterer Vorteil: eine verbesserte Mundhygiene dank Bakterien- und Plaque-resistenteren NiTi-Materials.**

## VORTEILE


- **geringe, gleichmäßige Kräfte**
- **vorhersagbarer Lückenschluss**
- **jederzeit idealer Kraftbereich**
- **1 Loop für Lückenschluss bis 6 mm**
- **Reduzierung von Praxisterminen**
- **universell einsetzbar, kompatibel mit SL- und Twin-Brackets**
- **nur minimale Anpassung erforderlich**
- **hergestellt aus .010" NiTi-Draht**
- **unauffällig und kaum spürbar**



### KRAFTABNAHME / TAG 1-28

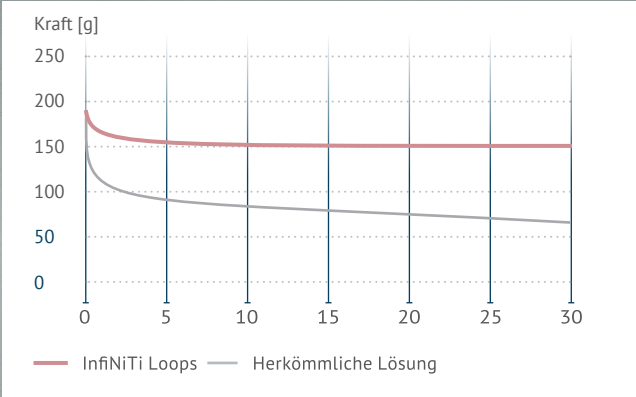

### ANFANGSKRAFT / TAG 1

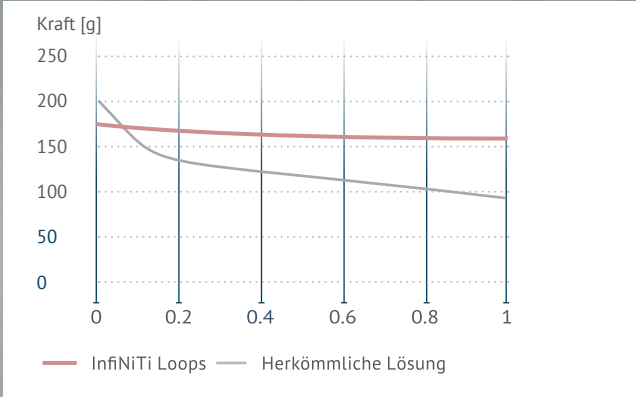

ART-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
1010-10204U21	Carriere InfiNiTi Loops 4-Loop 21 mm Kit	3 x Power Closer / 3 x Size Selector
1010-10204U24	Carriere InfiNiTi Loops 4-Loop 24 mm Kit	3 x Power Closer / 3 x Size Selector
1010-10204U27	Carriere InfiNiTi Loops 4-Loop 27 mm Kit	3 x Power Closer / 3 x Size Selector
1010-10204U30	Carriere InfiNiTi Loops 4-Loop 30 mm Kit	3 x Power Closer / 3 x Size Selector